

<b>Gerät</b>	<b>Auslesen der Betriebsstunden</b>	<b>Bild vom Gerät</b>
<b>I-Go-2</b>	Bei an die Stromversorgung angeschlossenem und ausgeschaltetem Gerät: Halten Sie alle drei Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Die Betriebsstunden werden angezeigt.	
<b>Zen-O-Lite</b>	Setzen Sie die angeschlossene Nasenbrille auf und schalten Sie das Gerät ein. Dann „+“ und „-“ Taste drücken und gedrückt halten. Es erscheint nach ca. 3 Sekunden „Diagnostics“ im Display. Drücken Sie 3 mal die „+“ Taste. Es erscheinen die Betriebsstunden im Display.	
<b>Simply-Go-Mini</b>	Der Zähler sitzt oben an der linken Außenseite.	