

<b>Gerät</b>	<b>Auslesen der Betriebsstunden</b>	<b>Bild vom Gerät</b>
<b>I-Go</b>	Das Gerät aus der Tasche nehmen und umdrehen. Am Boden befindet sich der Zähler.	
<b>Zen-O</b>	Setzen Sie die angeschlossene Nasenbrille auf und schalten Sie das Gerät ein. Dann „+“ und „-“ Taste drücken und gedrückt halten. Es erscheint nach ca. 3 Sekunden „Diagnostics“ im Display. Drücken Sie 3 mal die „+“ Taste. Es erscheinen die Betriebsstunden im Display.	
<b>Simply-Go</b>	Den Startknopf 1x drücken. Dann erscheint im Display die Stundenanzeige, beginnend mit HR.	