


Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
<p>Curasa EUT und Auto (Curative Medical)</p>	<p>Rechte Taste solange (11x) drücken, bis „Patient xxxxxhr“ erscheint.</p>	
<p>Goodknight / EcoStar-Basic (Mediproject)</p>	<p>Linke Taste gedrückt halten bis sich die Anzeige ändert. Die linke Taste so oft drücken (je nach Modell) bis Therapiestunden erscheinen (zusätzlich zu dem „h“ erscheint noch ein Strichmännchen).</p>	
<p>Prisma-Serie (Löwenstein Medical)</p>	<p>Den Stecker einmal raus nehmen und wieder einstecken. Es werden für ca. 30 Sekunden die Therapiestunden angezeigt.</p>	

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
<p>Sleep Cube (DeVilbiss)</p>	<p>Gerät einschalten, dann die Pfeiltaste nach links so lange drücken bis „Anwenderstunden“ erscheinen.</p>	
<p>Somnocomfort 2 / Somnobalance / Somnoplus 2 (Löwenstein Medical)</p>	<p>Beim Einschalten werden die Patientenstunden für 3 Sekunden angezeigt.</p>	

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
<p>S9 Serie (ResMed)</p>	<p>Die „i“ Taste drücken, dann mit dem Drehrad auf „Schlafbericht“ stellen, auf Drehradknopf drücken, dann wird „Zeitr.“ hellblau hinterlegt, nun noch einmal auf Drehradknopf drücken, dann wird „Zeitr.“ gelb/orange hinterlegt, jetzt mit Drehradknopf auf „1 Jahr“ stellen und mit dem Drehradknopf bestätigen. Unter „Ntzg.std.“ werden die Therapiestunden angezeigt. Durch zweimaliges Drücken auf die Taste unter der „i-Taste“ kommt man wieder zur Startseite.</p>	
<p>S10 Serie (ResMed)</p>	<p>Das Gerät hat Strom und das Display ist beleuchtet. Das Gerät muss auf der Startseite stehen. Mit dem Drehrad auf Schlafbericht drehen und drücken. Dann kommt die Anzeige Nutzungszeit letzte Nacht, Maskensitz und ganz unten stehen die Gesamtnutzungsstunden.</p>	

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
S11 Serie (ResMed)	Im Startbildschirm „Mein Schlaf“ wählen. Im unteren Bildschirm stehen die Gesamtnutzungsstunden.	 A photograph of a ResMed S11 CPAP machine, which is a compact, black and white device with a small color display screen on the front.