

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
AirCurve / AirSense	<p>Das Gerät hat Strom und das Display ist beleuchtet. Das Gerät muss auf der Startseite stehen. Mit dem Drehrad auf Schlafbericht drehen und drücken. Dann kommt die Anzeige Nutzungszeit letzte Nacht, Maskensitz und ganz unten stehen die Gesamtnutzungsstunden.</p>	
Curasa EUT und Auto	<p>Rechte Taste solange (11x) drücken, bis „Patient xxxxxhr“ erscheint.</p>	
Goodnight / EcoStar	<p>Linke Taste gedrückt halten bis sich die Anzeige ändert. Die linke Taste so oft drücken (je nach Modell) bis Therapiestunden erscheinen (zusätzlich zu dem „h“ erscheint noch ein Strichmännchen).</p>	

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
Heinen & Löwenstein (Prisma)	Beim Einschalten werden die Patientenstunden für 3 Sekunden angezeigt.	
S8 & VPAP	Die linke Menütaste drücken und evtl. Pfeil nach unten drücken bis die Patientenstunden erscheinen.	
Sleep Cube	Gerät einschalten, dann die Pfeiltaste nach links so lange drücken bis „Anwenderstunden“ erscheinen.	

Gerät	Auslesen der Betriebsstunden	Bild vom Gerät
S9	<p>Die „i“ Taste drücken, dann mit dem Drehrad auf „Schlafbericht“ stellen, auf Drehradknopf drücken, dann wird „Zeitr.“ hellblau hinterlegt, nun noch einmal auf Drehradknopf drücken, dann wird „Zeitr.“ gelb/orange hinterlegt, jetzt mit Drehradknopf auf „1 Jahr“ stellen und mit dem Drehradknopf bestätigen. Unter „Ntzg.std. ...“ werden die Therapiestunden angezeigt. Durch zweimaliges Drücken auf die Taste unter der „i-Taste“ kommt man wieder zur Startseite.</p>	
Trend/Point	<p>Wenn man das Gerät mit Strom verbindet werden die Therapiestunden im Display angezeigt.</p>	